

Инструкция по открытию КТ-исследования с почты

5 ПРОСТЫХ ШАГОВ:

для начала работы с исследованием
без его записи на CD-диск

К вам на почту пришло письмо
со ссылкой на исследование вашего пациента.

Рассмотрим порядок его открытия

1. Открыть письмо
2. Перейти по ссылке
3. Скачать исследование
4. Извлечь архив
5. Запустить программу-просмотрщик


шаг №1

«ОТКРЫТЬ ПИСЬМО»



Для начала открываем письмо и кликаем по ссылке левой клавишей мыши один раз.

24.06.15 Иванов И. И. КТ 12x8,5 см ДЦ Проспект Вернадского Входящие x

 Пикассо <ask.picasso@gmail.com> 16:37 (5 мин. назад)


кому: мне ▾


<https://yadi.sk/i/Q4D-nXlvavnS7> ← **ссылка на исследование**

—
Спасибо за доверие, оказанное нашим центрам!
Обращаем Ваше внимание, что с более подробной информацией о преимуществах 3D-диагностики в стоматологии, видах исследований и их стоимости Вы сможете ознакомиться на сайте компании:
www.picasso-diagnostic.ru

Если во время работы с исследованием у Вас возникли вопросы или затруднения технического характера, напишите об этом на почту help.picasso@gmail.com. Мы обязательно Вам поможем!

Независимые рентгенодиагностические центры "Пикассо"
+7 (495) 989 70 08;
+7 (495) 638 56 73;

 ПИКАССО


 Нажмите здесь, чтобы [Ответить](#) или [Переслать](#)

Диагностика как искусство!

шаг №2

«СКАЧАТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ»

В открывшемся окне нажать «Скачать». Запускается процесс скачивания исследования. Это может занять некоторое время (в зависимости от скорости вашего интернет-соединения)

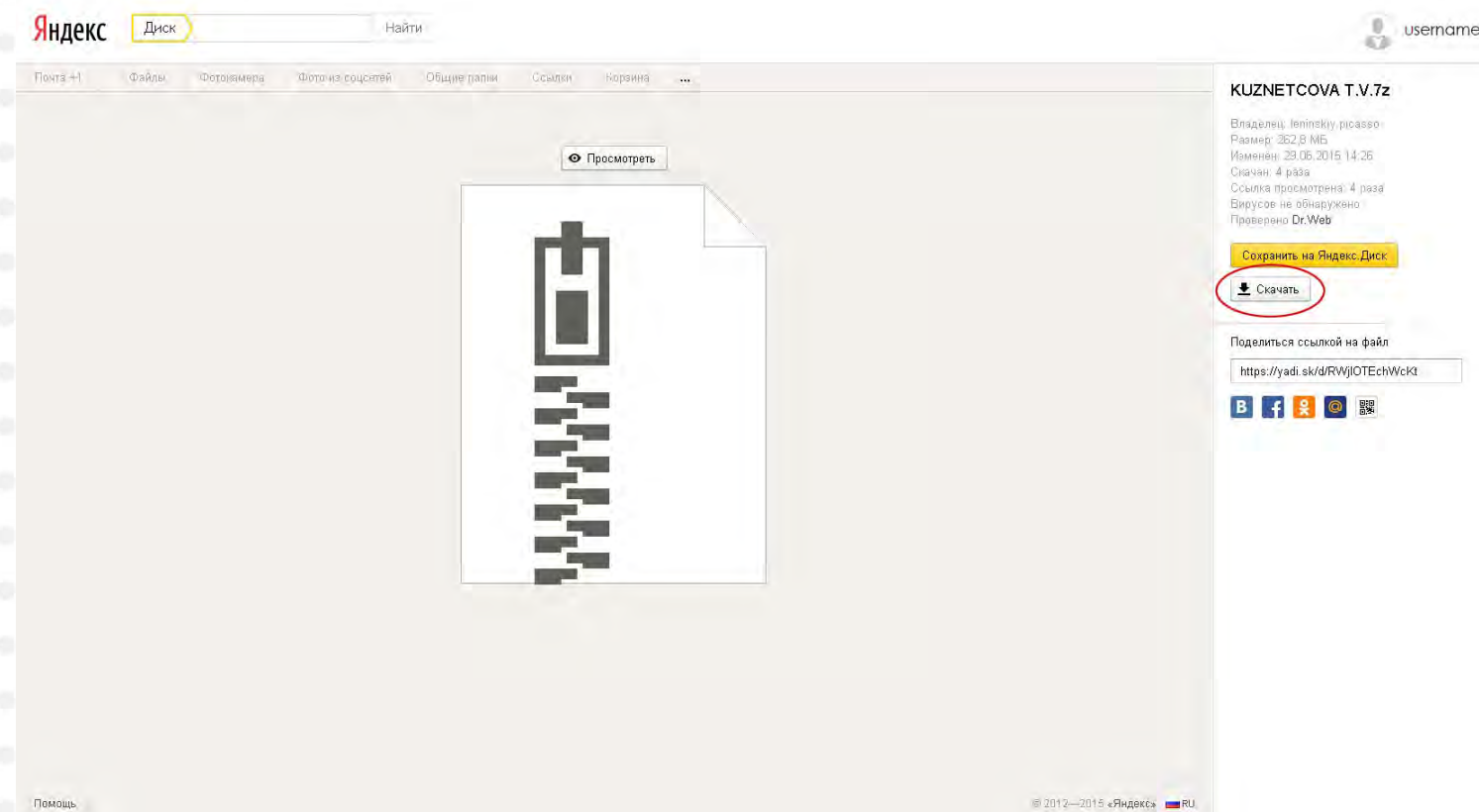

Диагностика как искусство!

шаг №3

«ОТКРЫТЬ АРХИВ»



После этого двойным щелчком левой клавиши мы нажимаем на скаченное исследование*.

*Программу архиватор
необходимо установить отдельно




Диагностика как искусство!

шаг №4


«ИЗВЛЕЧЬ АРХИВ»

- Далее исследование открывается в программе архиваторе.
- Нажимаем «Извлечь», указываем место извлечения и после процедуры переходим в эту папку для работы с исследованием.

Ниже приведены скриншоты самых популярных программ для работы с архивами:

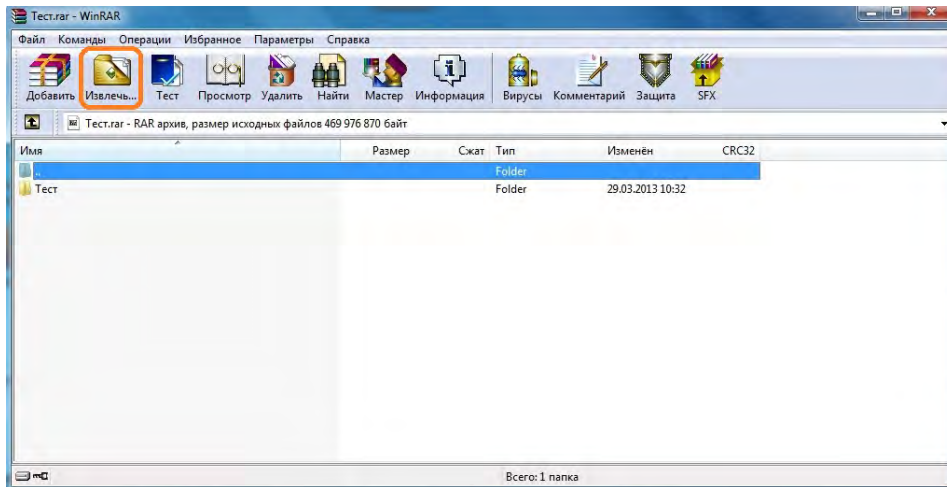

„WinRAR“

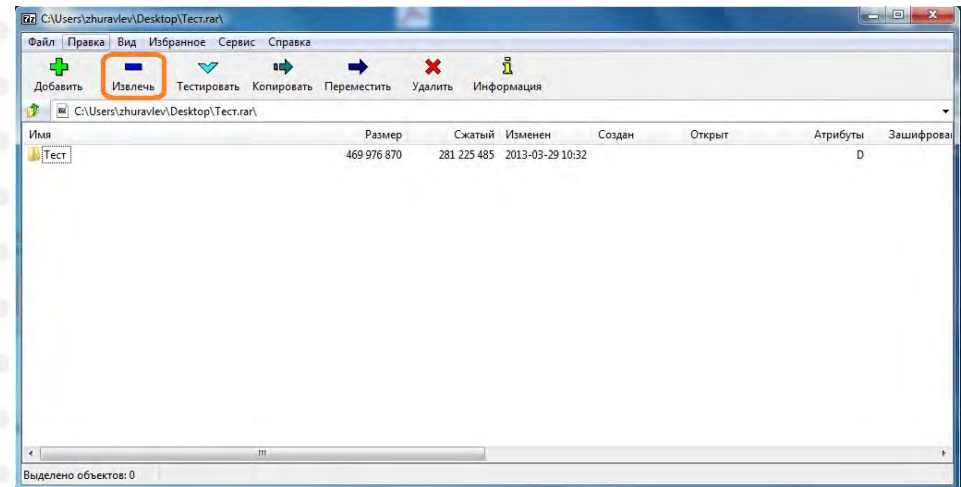



„7 zip“

Диагностика как искусство!

шаг №5

«ЗАПУСК ПРОГРАММЫ»

Далее переходим в извлеченную папку и открываем двойным щелчком левой клавиши мыши файл «PicassoViewer.exe». После открытия программы вам нужно нажать на кнопку «Открыть исследование».

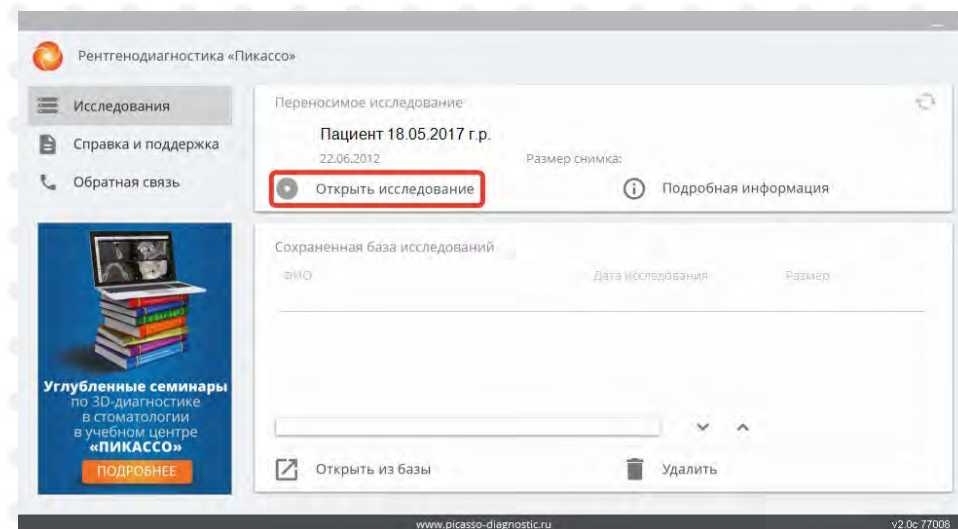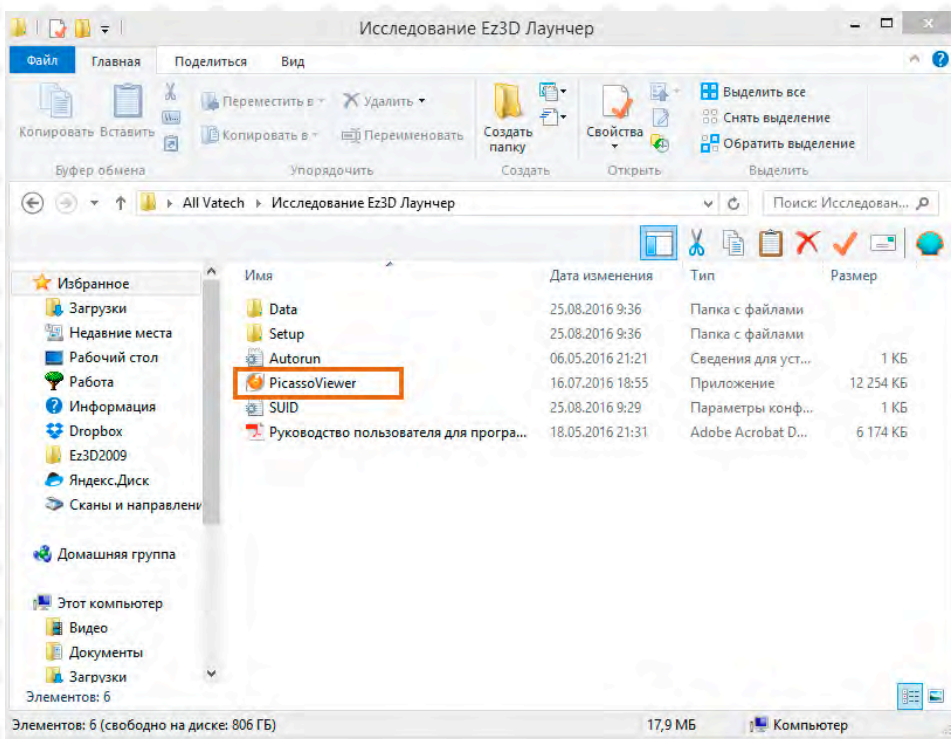

Диагностика как искусство!

После этих действий вы можете приступить к работе с исследованием.

Если во время работы с исследованием у вас возникли вопросы или затруднения технического характера, напишите об этом на почту help.picasso@gmail.com.

Мы обязательно вам поможем!



Диагностика как искусство!



Наши специалисты всегда на связи!

www.picasso-diagnostic.ru



Диагностика как искусство!